

Como amar una máscara V0

DIY
MED
MSK

En el siguiente instructivo explicaremos como armar una máscara Vo.

Elementos:

- Plano Vo
- Dos bandas de friselina de 3cm de ancho y 30cm de largo
- Una perforadora de hojas o elemento punzante para hacer perforaciones de 5mm de diámetro aprox.
- Regla
- Cinta métrica
- Birome o marcador
- Tijera o cutter
- Pistola de pegamento o cemento de contacto
- Un elástico
- Una pantalla abierta o cerrada (ver instructivo)


ATENCIÓN: *Tener cuidado con la manipulación los elementos cortantes. No permitir que niños manipulen estos elementos sin la supervisión de un adulto.*

Procedimiento:

1. Medir y cortar dos bandas de friselina de 30cm (Ver plano Vo).



2. Pegar ambas bandas con una pistola de pegamento o cemento de contacto, formando una banda única de friselina de 30cm.

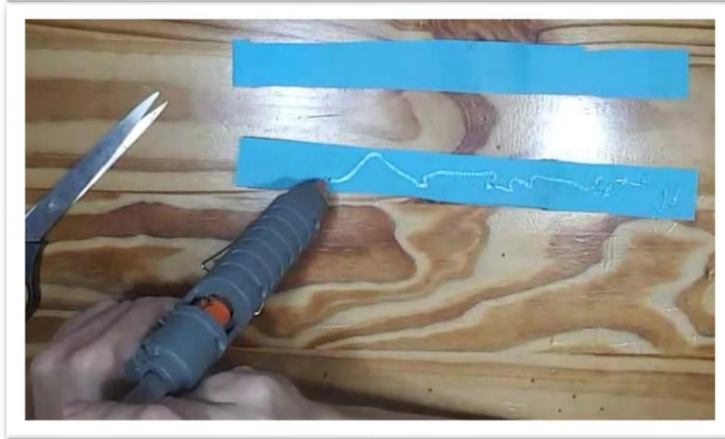

3. Medir y hacer perforaciones a las medidas indicadas en el plano.



4. Coincidir las perforaciones **a** y **b** de la banda con las perforaciones de la pantalla elegida (abierta o cerrada).
5. Atravesar un precinto que entre por **a** y salga por **b**, atravesando la banda y la pantalla.
6. Cerrar precintos de ambos lados de la máscara (debe quedar la traba del precinto hacia fuera de la máscara).
7. Colocar elástico en las perforaciones libres.

