

# Como armar una máscara V1

DIY  
MED  
MSK

En el siguiente instructivo explicaremos como armar un mascara V1.

## **Elementos:**

- Plano V1
- Un zuncho plástico de 16mm de ancho y 70 cm de largo (o uno de 30 cm y uno de 40 cm)
- Una perforadora de hojas o elemento punzante para hacer perforaciones de 5mm de diámetro aprox.
- Regla
- Cinta métrica
- Birome o marcador
- Tijera o cutter
- Un elástico
- Una pantalla abierta o cerrada (ver instructivo)

**ATENCIÓN:** *Tener cuidado con la manipulación los elementos cortantes. No permitir que niños manipulen estos elementos sin la supervisión de un adulto.*

## **Procedimiento:**

1. Hacer dobléz del zuncho plástico en 40 cm (o colocar los zunchos de 30 y 40 cm como indica la imagen).



2. Marcar y hacer perforaciones en zuncho plástico (ver plano).



3. Coincidir las perforaciones **a** y **b** de la banda con las perforaciones de la pantalla elegida (abierta o cerrada).



4. Atravesar un precinto que entre por **a** y salga por **b**, atravesando la banda y la pantalla.
5. Cerrar precintos de ambos lados de la máscara (debe quedar la traba del precinto hacia fuera de la máscara).
6. Colocar elástico en las perforaciones libres.

